

Aspirator Kataru Pan Nosek APTEO, 1 szt.

Cena: 51,45 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Aspirator kataru Pan Nosek to urządzenie służące do odciągania wydzieliny z nosa u niemowląt, dzieci i dorosłych.

Wyrób może być stosowany u dzieci w każdym wieku i u osób dorosłych z uciążliwym problemem zalegającej wydzieliny w nosie.

Wskazania:

- katar alergiczny,
- katar infekcyjny (wirusowy i bakteryjny),
- sezonowe nieżyty nosa.

Sposób użycia:

1. Połączyć elementy aspiratora zgodnie z dołączoną instrukcją.
2. Połączyć niebieską wkładkę z rurą ssącą do odkurzacza domowego (o mocy 800-1800 W) i uruchomić odkurzacza. W zależności od potrzeb i oczekiwanej siły ssącej, użyć regulatora na aspiratorze.
3. Przyłożyć końcówkę aspiratora do przedsionka nosa (niewskazane jest penetrowanie komory nosa) i odciągnąć katar z każdej przegrody nosowej przez czas nie dłuższy niż 5-10 sekund.
4. Jeśli zalegająca wydzielina nie została w pełni odciągnięta ponówić proces.
5. Po skończonym zabiegu rozłożyć aspirator i umyć go pod bieżącą, ciepłą wodą. W przypadku silnych zabrudzeń można zastosować środki czyszczące przeznaczone do stosowania u dzieci i niemowląt.

Niezastosowanie się do zaleceń dotyczących czyszczenia może spowodować zaleganie bakterii i wirusów we wnętrzu aspiratora oraz spowodować zanieczyszczenie mechaniczne wyrobu.

Przeciwwskazania:

- Krwawienie z nosa.
- Uszkodzenia błony śluzowej nosa.
- Obrzęk błony śluzowej nosa.

Zawartość opakowania:

- aspirator kataru
- 2 końcówki + dodatkowa nakładka silikonowa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.