

Baikadent Afto-stop spray, 30 ml

Cena: 21,00 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 ml
Postać	spray
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Baikadent Afto-stop to wyrób medyczny w postaci sprayu do stosowania na zmiany w jamie ustnej.

Preparat może być stosowany wspomagająco podczas łagodzenia dolegliwości bólowych wywołanych przez niewielkie zmiany w jamie ustnej takie jak:

- aftowe zapalenia jamy ustnej,
- owrzodzenia aftowe,
- zmiany wywołane noszeniem aparatu ortodontycznego,
- niewłaściwie dopasowane protezy.

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem należy energicznie wstrząsnąć butelką, następnie kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem.

Aplikator skierować na zmianę w jamie ustnej i naciskając rozpylić 3 razy lub tyle, ile jest potrzebne aby pokryć zmianę.

Zaleca się stosować 3-4 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby.

Dla lepszego rezultatu nie należy jeść i pić przez godzinę po zastosowaniu.

Skład:

woda demineralizowana, glicerol, nanosrebro, nanomiedź, nanozłoto, olejek z mięty pieprzowej, polisorbata 20, olej z pestek winogron, benzoian sodu, sorbinian potasu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.

W przypadku ciąży lub karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Środki ostrożności:

Unikać kontaktu z oczami.

W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania.

Nie należy używać po upływie terminu ważności.

Opakowanie: 30 ml (300 dawek), butelka z aplikatorem

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.