

Blend-a-dent Plus Dual Power Premium klej do protez w kremie 40 g

Cena: 22,30 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	-
Producent	A & D PHARMA POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

Nieźrównane umocowanie w porównaniu z innymi produktami linii Blend-a-dent: do 88% początkowej siły umocowania pod koniec dnia, 10-krotnie silniejsze umocowanie (w porównaniu z protezą noszoną bez kleju) utrzymuje protezę na miejscu, Daje możliwość swobodnego spożywania wszelkiego rodzaju twardych pokarmów dzięki wyjątkowej sile kleju, Działa jak amortyzacja między dziąsłami a protezą, pozwalając na indywidualne dopasowanie, Łatwe nakładanie w cienkich paskach dzięki standardowej końcówce, Bezsmakowa formuła nie wpływa na smak potraw, Odpowiedni do pełnych i częściowych protez zębowych

Składniki

Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (35%), Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum (20%), Petrolatum, Silica, CI 45410

Stosowanie

Instrukcja użycia:

1. Dokładnie oczyść protezę i dziąsła.
2. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nałóż klej punktowo wzdłuż krawędzi i na powierzchniach protezy, które stykają się z jamą ustną.
3. Przed założeniem protezy przepłucz jamę ustną wodą. Nasz klej do protez został tak opracowany, aby pod wpływem wilgoci tworzyć ciekłą, szczelną barierę chroniącą przed przedostawaniem się cząsteczek pokarmu.
4. Mocno dociśnij protezę w odpowiednim miejscu i chwilę przytrzymaj.
5. Dla najlepszych rezultatów odczekaj 15-30 minut przed jedzeniem lub piciem.

Przeciwwskazania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakiegokolwiek składnik kleju.

Zawartość opakowania

40.0

Opis

Blend-a-dent Plus Dual Power Premium klej do protez w kremie 40 g

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.