

## Compeed Wyrób medyczny plastry na odciski między palcami 10 sztuk



Cena: 31,40 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	LABORATOIRE HRA PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Wstęp

COMPEED® Plastry na odciski z aktywnym żelem hydrokoloidowym, który przynosi natychmiastową ulgę w bólu i pomaga usunąć odcisk.

Nie tylko pozostaje na miejscu przez kilka dni (w indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić), ale również zapewnia optymalną amortyzację, chroniąc przed dalszym bolesnym ocieraniem m.in. pod stopą i uciskiem.

Technologia hydrokoloidowa COMPEED® zapewnia ulgę w bólu dzięki grubej wyścielanej warstwie, która szybko znosi nacisk powodujący powstanie odcisku. Technologia gojenia ran działa od wewnątrz, poprawiając nawilżenie i tym samym zmiękcza odcisk, co ułatwia jego usunięcie.

#### Właściwości:

Głęboka amortyzacja znosi nacisk powodujący odcisk i łagodzi ból.

Ma ultraprzylepne, wymodelowane krawędzie, dzięki którym warstwa amortyzacji elastycznie dopasowuje się do ruchów i pozostaje na miejscu, chroniąc przed dalszym tarcie.

Dobrze dopasowany, wodoodporny i oddychający plaster utrzymuje naturalną wilgoć i nie dopuszcza bakterii z zewnątrz, przyspieszając naturalny proces gojenia.

#### Sposób użycia:

Oczyścić i osuszyć skórę przed użyciem. Docelowy obszar nie może być tłusty od kremów czy olejków.

Usunąć górną, a następnie dolną papierową warstwę plastra, unikając dotyknięcia warstwy samoprzylepnej.

Przykleić plaster tak, aby osadzony w nim dysk znajdował się centralnie na odcisku i wygładzić brzegi plastra.

Pozostawić plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu do kilku dni.

Dla najlepszych rezultatów stosuj COMPEED® do czasu, aż skóra całkowicie się zagoi.

**Rozmiar:** 2,2 x 2,2 cm

**Opakowanie:** 10 plastrów

#### Wskazania

chronią przed uciskiem i otarciami, natychmiastowo uśmierza ból, pozostaje na miejscu

#### Składniki

plastry hydrokoloidowe

#### Stosowanie

Jak stosować plastry Compeed na odciski między palcami?

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę przed użyciem. Docelowy obszar nie może być tłusty od kremów czy olejków.
2. Usunąć górną, a następnie dolną papierową warstwę plastra, unikając dotyknięcia warstwy samoprzylepnej.
3. Przykleić plaster tak, aby osadzony w nim dysk znajdował się centralnie na odcisku. Wygładzić brzegi plastra.
4. Pozostawić plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu do kilku dni.
5. Dla najlepszych rezultatów stosuj Compeed do czasu, aż skóra całkowicie się zagoi.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.

#### Opis

Compeed Wyrób medyczny plastry na odciski między palcami 10 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.