

## Compeed Wyrób medyczny plastry na odciski średnie 10 sztuk



Cena: 27,80 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Wstęp

COMPEED® Plastry na odciski z aktywnym żelem hydrokoloidowym, przynoszącym natychmiastową ulgę w bólu i pomagającym usunąć odcisk. Plaster na odciski nie tylko pozostaje na miejscu przez wiele dni (w indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić), ale również zapewnia optymalną amortyzację, chroniąc przed dalszym ocieraniem i uciskiem.

#### Właściwości:

Dobrze dopasowany, wodoodporny i oddychający plaster utrzymuje naturalną wilgoć i nie dopuszcza bakterii z zewnątrz, przyspieszając naturalny proces gojenia.

Ultraprzylepne, wymodelowane krawędzie, dzięki którym warstwa amortyzacji elastycznie dopasowuje się do ruchów i pozostaje na miejscu, chroniąc przed dalszym tarciem.

Głęboka amortyzacja znosząca nacisk powodujący odcisk i łagodząca ból.

#### Sposób użycia:

Przed użyciem oczyścić i osuszyć skórę - docelowy obszar nie może być tłusty od kremów czy olejków.

Usunąć górną warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.

Przykleić plaster pewnym ruchem tak, aby zaśniał pęcherz i wygładzić jego brzegi.

Pozostawić plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).

**Rozmiar:** 1,75 x 6 cm

**Opakowanie:** 10 plastrów

#### **Wskazania**

chronią przed uciskiem i otarciami, natychmiastowo uśmierza ból, pozostaje na miejscu

#### **Składniki**

plastry hydrokoloidowe

#### **Stosowanie**

Jak stosować plastry Compeed na odciski, średnie?

1. Przed użyciem plastra oczyść i osusz skórę. Miejsce aplikacji nie może być tłuste od kremów czy olejków.
2. Usuń górną papierową warstwę ochronną plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.
3. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał odcisk. Wygładź brzegi plastra.
4. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).
5. Aby osiągnąć najlepszy rezultat stosuj plastry Compeed do czasu, aż skóra całkowicie się zagoi.

To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Producent**

Perrigo Poland Sp. z o.o.

#### **Opis**

Compeed Wyrób medyczny plastry na odciski średnie 10 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.