

Compeed Wyrób medyczny plastry na pęcherze mix 5 sztuk



Cena: 28,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

natychmiastowa ulga w bólu, przyspiesza gojenie, różne kształty, chroni przed otarciami, pozostaje na miejscu

Składniki

plastry hydrokolooidowe

Stosowanie

Jak stosować plastry Compeed na pęcherze mix:

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę przed użyciem. Miejsce z pęcherzem nie może być tłuste od kremów czy olejków.
2. Usunąć warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.
3. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra.
4. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).
5. Aby usunąć plaster: Nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.

Opis

Compeed Wyrób medyczny plastry na pęcherze mix 5 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.