

Compeed Wyrób medyczny plastry na pęcherze na piętę średnie 5 sztuk



Cena: 31,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

COMPEED® Plaster na pęcherze na piętę dla kobiet noszących wysokie obcasy wykorzystuje zaawansowaną technologię hydrokoloidową, zapewniając błyskawiczną ulgę w bólu i szybsze gojenie.

Odpowiednie do stosowania na wszystkie pęcherze powstałe wskutek noszenia obuwia na wysokim obcasie.

Właściwości:

Unikalne wyprofilowanie w kształcie motyla i przezroczyste krawędzie zapewniają dopasowanie do kształtu pięty i do ruchów, a tym samym wysoką dyskrecję.

Gruba warstwa amortyzacji zmniejsza nacisk i pozwala uniknąć bolesnego obcierania.

Dobrze dopasowany, wodoodporny i oddychający plaster utrzymuje naturalną wilgoć i nie dopuszcza bakterii z zewnątrz, przyspieszając naturalny proces gojenia, pozostaje na miejscu przez kilka dni.

Sposób użycia:

Oczyść i osusz skórę przed użyciem. Miejsce z pęcherzem nie może być tłuste od kremów czy olejków.

Usuń warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.

Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra.

Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).

Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

Rozmiar: 4,2 x 6,8 cm

Opakowanie: 5 plastrów

Wskazania

komfort i dyskrecja, przyspiesza gojenie, natychmiastowa ulga w bólu, chroni przed obtarciami, pozostaje na miejscu

Składniki

plastry hydrokoloidowe

Stosowanie

Jak stosować plastry Compeed na pęcherze na piętę:

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę przed użyciem. Miejsce z pęcherzem nie może być tłuste od kremów czy olejków.
2. Usunąć warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.
3. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra.
4. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: Plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).
5. Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.

Opis

Compeed Wyrób medyczny plastry na pęcherze na piętę średnie 5 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.