

Compeed Wyrób medyczny plastry na pęcherze wąskie 6 sztuk



Cena: 26,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

COMPEED® Plastry na małe i wąskie pęcherze pochłaniają nadmiar wilgoci i tworzą poduszkę ochronną, zapewniając natychmiastową ulgę w bólu i optymalne warunki gojenia się pęcherzy na stopach.

Właściwości:

Dobrze dopasowany, wodoodporny i oddychający plaster utrzymuje naturalną wilgoć i nie dopuszcza bakterii z zewnątrz, przyspieszając naturalny proces gojenia.

Ultraprzylepne, wymodelowane krawędzie sprawiają, że plaster Compeed elastycznie dopasowuje się do ruchów i pozostaje na miejscu przez kilka dni.

Gruba warstwa amortyzacji zmniejsza nacisk i pozwala uniknąć bolesnego obcierania.

Sposób użycia:

Oczyść i osusz skórę przed użyciem. Miejsce z pęcherzem nie może być tłuste od kremów czy olejków.

Usuń warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej i przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra.

Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).

Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

Rozmiar: 2 x 6 cm

Opakowanie: 6 plastrów

Wskazania

natychmiastowa ulga w bólu, przyspiesza gojenie, chroni przed otarciami, pozostaje na miejscu

Składniki

plastry hydrokolidowe

Stosowanie

Jak stosować plastry Compeed na pęcherze wąskie:

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę przed użyciem. Miejsce z pęcherzem nie może być tłuste od kremów czy olejków.
2. Usunąć warstwę papierową plastra, unikając dotyknięcia warstwy samoprzylepnej.
3. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra.
4. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).
5. Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.

Opis

Compeed Wyrób medyczny plastry na pęcherze wąskie 6 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.