

Compeed Wyrób medyczny plastry na zwyrodnienia kostne halluksy średnie 5 sztuk



Cena: 29,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Plastry na zwyrodnienia kostne COMPEED® zostały zaprojektowane tak, aby dobrze przylegały do stopy, zapewniają błyskawiczną ulgę od bolesnego ucisku i obcierania. Pomagają zapobiegać powstawaniu pęcherzy i dalszemu twardnieniu skóry, aby uniknąć wystąpienia innych bolesnych dolegliwości skórnych.

Aktywny żel na bazie technologii hydrokoloidowej COMPEED® zapewnia natychmiastową ulgę w bólu dzięki grubo wyściełanej warstwie, która szybko znosi nacisk i eliminuje tarcie, przyczyniające się do dalszego rozwoju palucha koślawego.

Sposób użycia:

Przed użyciem oczyść i osusz skórę. Obszar, na którym znajduje się pęcherz, nie może być tłusty od kremów czy olejków.

Usuń warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.

Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz i wygładź brzegi plastra.

Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).

Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

Rozmiar: 4,7 x 6,8 cm

Opakowanie: 5 plastrów

Wskazania

natychmiastowa ulga w ucisku i ocieraniu, pozostaje na miejscu

Składniki

plastry hydrokolidowe

Stosowanie

Jak stosować plastry Compeed na zwyrodnienia kostne (halluksy)?

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę przed użyciem. Obszar, na którym znajduje się pęcherz, nie może być tłusty od kremów czy olejków.
 2. Usunąć warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.
 3. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra.
 4. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: Plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).
- Aby usunąć plaster: Nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o

Opis

Compeed Wyrób medyczny plastry na zwyrodnienia kostne halluksy średnie 5 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.