

Corega Bio Formula Wyrób medyczny tabletki do codziennego stosowania 136 sztuk



Cena: 54,40 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	136 tabl.
Postać	tabl.rozpusz.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Corega Tabs Bio Formula - preparat do pielęgnacji protez zębowych w postaci rozpuszczalnych w wodzie tabletek.

Zapewnia bezpieczną i efektywną pielęgnację protezy zębowej. Składnik zmniejszający napięcie powierzchniowe oraz aktywny tlen pozwalają środkiem czyszczącym i enzymom rozkładającym płytkę nazębną dotrzeć do najbardziej niedostępnych części protezy.

Właściwości:

- aktywna ochrona przed rozwojem bakterii
- chroni dziąsła przed infekcją
- eliminuje przykry zapach z ust
- system czyszczący 4 w 1 (usuwa przebarwienia, czyści, aktywuje tlen, usuwa bakteria)
- zapewnia czystość protezy i uczucie świeżości w jamie ustnej

Instrukcja stosowania:

1. Wrzucić tabletkę Corega Tabs Bio Formula do naczynia z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można w niej było całkowicie zanurzyć protezę.
2. Włożyć protezę do roztworu i pozostawić na 3 do 5 minut, następnie szczotkować protezę miękką szczoteczką. Pozostały roztwór należy wylać.
3. Dokładnie opłukać protezę pod bieżącą wodą.

Opakowanie: 136 tabletek

Wskazania

aktywna ochrona przed rozwojem bakterii, zabija 99,9% bakterii* będących przyczyną nieświeżego oddechu *podczas badań laboratoryjnych, system czyszczący 4 w 1, esencja mięty

Składniki

wodorowęglan sodu, kwas cytrynowy, karonian potasu (monosiarczan potasu), węglan sodu, nadtlenuk węgla sodu, TAED, benzoosan sodu, PEG-180, laurylosiarczan sodu, kopolimer VP / VA, aromat, subtylizyna, guma celulozowa, CI 42090, CI 73015

Stosowanie

Instrukcja stosowania

1. Wrzucić tabletkę Corega do pojemnika lub szklanki z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można było w niej całkowicie zanurzyć protezę.
2. Po namoczeniu przez 3-5 minut wyczyścić protezę miękką szczoteczką.
3. Następnie dokładnie opłucz protezę pod bieżącą wodą. Pozostały roztwór niezwłocznie wylej.

Przeciwwskazania

OSTRZEŻENIE: Szkodliwy w przypadku połknięcia. Działa silnie drażniąco na oczy. Po bezpośrednim kontakcie rąk z tabletkami lub roztworem należy dokładnie umyć ręce. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeśli podrażnienie oczu nie ustępuje konieczna jest porada lub pomoc lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób narażonych na przypadkowe połknięcie tabletek lub roztworu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. W razie wystąpienia podrażnienia: zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza. Zawiera OLEJEK MIĘTY PIEPRZOWEJ I SUBTYLIZYNĘ. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA:

Nie umieszczać tabletek Corega ani roztworu w jamie ustnej. Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Nie pić roztworu powstałego po rozpuszczeniu tabletek ani nie używać go do płukania jamy ustnej. Nie dotykać jamy ustnej ani oczu rękami mającymi uprzednio bezpośredni kontakt z tabletkami lub roztworem.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

Ważne

Znaki towarowe są własnością lub są licencjonowane przez spółki z grupy GSK. 2021 Spółki z grupy GSK lub ich licencjodawcy.

Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1639

Opis

Corega Bio Formula Wyrób medyczny tabletki do codziennego stosowania 136 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Corega Bio Formula

Przewidziane zastosowanie: Tabletki do czyszczenia
protez zębowych
Podmiot prowadzący reklamę: Haleon Poland Sp z o.o.
Producent: Stafford-Miller (Ireland) Limited

HALEON

COREGA