

Corega Komfort Krem mocujący do protez zębowych miętowy smak 40 g

Cena: 25,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Corega Komfort - krem mocujący, tworzący aktywowany za pomocą wody żel, który zawiera karbomer i karboksymetylocelulozę.

Krem wykazuje natychmiastowe działanie, zapewnia dziąsłom ochronną warstwę amortyzującą i wygodne mocowanie protezy przez cały dzień.

Zalety kremu Corega Komfort:

- ochrona dziąseł i zapobieganie podrażnieniom
- łatwość użycia dzięki precyzyjnej końcówce
- mocowanie protezy przez cały dzień

Sposób użycia:

1. Oczyszczyć i osuszyć protezę.
2. Nałożyć produkt zgodnie z instrukcjami - nie za blisko krawędzi protezy.

Proteza górna: nanieść produkt w postaci jednego długiego paska i uzupełnić go dwoma krótszymi paskami na środku protezy.

Proteza dolna: nanieść produkt w postaci jednego długiego paska.

Proteza częściowa: nałożyć dwa krótkie paski produktu.

3. Wypłukać usta przed założeniem protezy.
4. Docisnąć protezę do miejsc z nałożonym kremem mocującym, przytrzymać mocno i zagryźć protezę na kilka sekund.

Wyjmowanie protezy:

1. Wypłukać jamę ustną wodą.
2. Powoli, delikatnie kołysząc protezę na boki, wyjąć ją z jamy ustnej.
3. Resztki kremu usunąć z dziąseł i protezy za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki.

Opakowanie: 40 g

Wskazania

technologia Adaptagrip, precyzyjna końcówka aplikatora, pomaga chronić dziąsła przed naciskiem protezy, tarciami oraz podrażnieniami, stabilnie mocuje protezę na cały dzień

Składniki

Cellulose gum, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Carbomer, Silica, Cera Alba, Aroma, Limonene

Stosowanie

Ważne: Instrukcja stosowania w ulotce dołączonej do opakowania.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenia i środki ostrożności: przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na ten produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego np. nudności. Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to szkodliwe. Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty. Końcówka tubki i nakrętka powinny być suche aby nie spowodować zatkania tubki. Karton powinien być zaklejony. Nie stosować jeśli opakowanie jest otwarte.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

Zawartość opakowania

40

Opis

Corega Komfort Krem mocujący do protez zębowych miętowy smak 40 g

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria



Komfort

40g