

Corega Podwójna Siła Tabletki do codziennego czyszczenia protez zębowych 36 sztuk



Cena: 16,20 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	36 tabl.
Postać	tabl.rozpusz.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Corega Podwójna Siła Tabletki do codziennego czyszczenia protez zębowych.

Składniki:

Sodium bicarbonate, Sodium carbonate peroxide, Citric acid, Potassium caroate (Potassium monopersulfate), Sodium benzoate, PEG-180, Sodium lauryl sulfate, VP/VA copolymer, Aroma, Cellulose gum, CI 42090, CI 73015, CI 19140

Właściwości:

- szybkie, niezrównane czyszczenie* **
- zabija 99,99% bakterii będących przyczyną nieświeżego oddechu*
- szybko usuwa więcej przebarwień* **
- uwalnia 2x więcej składników czyszczących**

*w testach laboratoryjnych

**w porównaniu z innymi tabletkami Corega

Sposób użycia:

1. Wrzuć tabletkę Corega do naczynia z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można w niej było całkowicie zanurzyć protezę.
2. Włóż protezę do roztworu i pozostaw na przynajmniej 5 minut, następnie szczotkować protezę miękką szczoteczką. Pozostały roztwór należy wylać.
3. Dokładnie opłukać protezę pod bieżącą wodą.

UWAGA

Nie umieszczać tabletki Corega ani roztworu w jamie ustnej. Nie pić roztworu powstałego po rozpuszczeniu tabletki ani nie używać go do płukania jamy ustnej. Nie dotykać jamy ustnej ani oczu rękami mającymi uprzednio bezpośredni kontakt z tabletkami lub roztworem.

Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać tabletki w miejscu niedostępnym dla dzieci i każdego, kto mógłby przypadkiem połknąć tabletkę lub wypić roztwór.

W RAZIE POŁKNIĘCIA: Skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. W razie wystąpienia podrażnienia: zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza.

OSTRZEŻENIE

Działa silnie drażniąco na oczy. Po bezpośrednim kontakcie rąk z tabletkami lub z roztworem należy ręce dokładnie umyć.

W RAZIE DOSTANIA SIĘ DO OCZU: przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeśli podrażnienie oczu nie ustępuje konieczna jest porada lub pomoc lekarska.

Zawiera olejek mięty pieprzowej. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opakowanie: 36 tabletek

Wskazania

szybkie, niezrównane czyszczenie* w porównaniu z innymi tabletkami Corega *w testach laboratoryjnych, zabija 99,99% bakterii będących przyczyną nieświeżego oddechu* *w testach laboratoryjnych, szybko usuwa więcej przebarwień* w porównaniu z innymi tabletkami Corega, uwalnia 2x więcej składników czyszczących w porównaniu z innymi tabletkami Corega

Składniki

Sodium bicarbonate, Sodium carbonate peroxide, Citric acid, Potassium caroate (Potassium monopersulfate), Sodium carbonate, TAED, Sodium benzoate, PEG-180, Sodium lauryl sulfate, VP/VA copolymer, Aroma, Cellulose gum, CI 42090, CI 73015, CI 19140

Stosowanie

Instrukcja stosowania

1. Wrzuć tabletkę Corega do naczynia z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można w niej było całkowicie zanurzyć protezę.
2. Włóż protezę do roztworu i pozostaw na przynajmniej 5 minut, następnie szczotkować protezę miękką szczoteczką. Pozostały roztwór należy wylać.
3. Dokładnie opłukać protezę pod bieżącą wodą.

Przechowywanie

Najlepiej zużyć przed końcem: data podana na opakowaniu.

Przeciwwskazania

UWAGA

Nie umieszczać tabletki Corega ani roztworu w jamie ustnej. Nie pić roztworu powstałego po rozpuszczeniu tabletki ani nie używać go do płukania jamy ustnej. Nie dotykać jamy ustnej ani oczu rękami mającymi uprzednio bezpośredni kontakt z tabletkami lub roztworem. Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Przechowywać tabletki w miejscu niedostępnym dla dzieci i każdego, kto mógłby przypadkiem połknąć tabletkę lub wypić roztwór. W RAZIE POŁKNIĘCIA: Skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. W razie wystąpienia podrażnienia: zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza.

OSTRZEŻENIE: Działa silnie drażniąco na oczy. Po bezpośrednim kontakcie rąk z tabletkami lub roztworem należy ręce dokładnie umyć. W RAZIE DOSTANIA SIĘ DO OCZU: przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeśli podrażnienie oczu nie ustępuje konieczna jest porada lub pomoc lekarska. Zawiera olejek mięty pieprzowej. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

Ważne

Znak CE - zgodność z przepisami UE- 1639

Opis

Corega Podwójna Siła Tabletki do codziennego czyszczenia protez zębowych 36 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.