


Corega Power Max Tabletki do codziennego czyszczenia protez zębowych max czyszczenie 30 sztuk

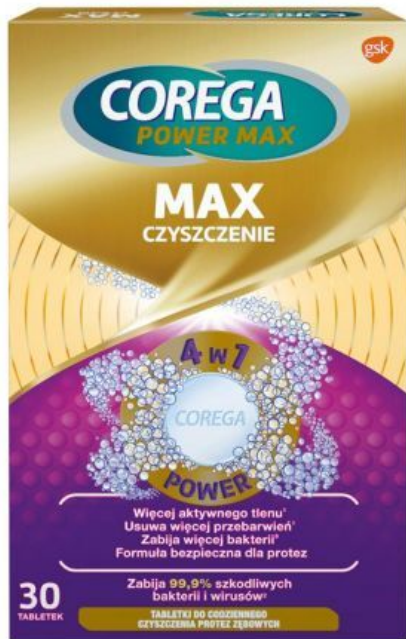

Cena: 14,10 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.rozpusz.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

Do protez zębowych całkowitych i częściowych, Moc 4 w 1, Więcej aktywnego tlenu* *w porównaniu do Corega 3 MINUTY, w testach laboratoryjnych, Zabija 99,9% bakterii i wirusów* *w testach laboratoryjnych, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami, Formuła czyszcząca usuwająca przebarwienia, Nie powoduje uszkodzeń protezy

Składniki

wodorowęglan sodu, nadtlenek węglanu sodu, kwas cytrynowy, karonian potasu (monosiarczan potasu), węglan sodu, TAED, benzoesan sodu, PEG-180, laurylosiarczan sodu, kopolimer VP/VA, aromat, guma celulozowa, CI 42090, CI 73015, CI 19140

Stosowanie

Instrukcja użytkowania:

1. Wrzuć tabletkę Corega Max Czyszczenie do pojemnika lub szklanki z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można było w niej całkowicie zanurzyć protezę zębową.
2. Pozostaw protezę zębową w roztworze na 3-5 minut. Dla lepszego rezultatu, po wyjęciu protezy z roztworu, wyczyść ją miękką szczoteczką. Pozostały roztwór niezwłocznie wylej.
3. Dokładnie opłucz protezę zębową pod bieżącą wodą.

Przeciwwskazania

OSTRZEŻENIE: Działa szkodliwie w przypadku połknięcia. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może powodować reakcję alergiczną. Dokładnie umyć ręce po kontakcie z tabletkami lub roztworem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie przemywać wodą przez kilka minut. W przypadku używania soczewek kontaktowych należy je wyjąć jeśli można to łatwo zrobić. Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W PRZYPADKU POŁKNIECIA:

skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. Wyrzucić do domowego pojemnika na odpadki. Zawiera OLEJEK MIĘTY PIEPRZOWEJ. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie używać jeśli zapieczętowane opakowania są podarte lub uszkodzone.

UWAGA

Nie umieszczać tabletek Corega ani roztworu w jamie ustnej. Nie pić roztworu powstałego po rozpuszczeniu tabletek ani nie używać go do płukania jamy ustnej. Nie dotykać jamy ustnej ani oczu rękami mającymi uprzednio bezpośredni kontakt z tabletkami lub roztworem. Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Przechowywać tabletki w miejscu niedostępnym dla dzieci i każdego, kto mógłby przypadkiem połknąć tabletkę lub wypić roztwór. W razie wystąpienia podrażnienia: zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

Ważne

Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1639

Opis

Corega Power Max Tabletki do codziennego czyszczenia protez zębowych max czyszczenie 30 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Corega Max Czyszczenie

Przewidziane zastosowanie: Tabletki do czyszczenia
protez zębowych

Podmiot prowadzący reklamę: Haleon Poland Sp z o.o.
Producent: Stafford-Miller (Ireland) Limited

HALEON

COREGA