

Corega Wyrób medyczny krem mocujący do protez zębowych super mocny delikatnie miętowy 70 g

Cena: 27,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	70 g
Postać	-
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-



Opis produktu

Wstęp

Krem mocujący do protez całkowitych i częściowych Corega Super Mocny zapewniający silne trzymanie protezy przez cały dzień.

Krem i jego właściwości mocujące pozwalają na jedzenie twardych i włóknistych pokarmów, ponadto pomagają w zapobieganiu dostawianiu się drażniących resztek pokarmu między protezę a dziąsła.

Tubka posiada unikalną, ułatwiającą aplikację kremu końcówkę.

Nawet jeśli proteza jest dobrze wykonana i dobrze pasuje, to stosowanie kremu mocującego Corega pomaga w zapewnieniu właściwego utrzymania i stabilizacji protezy,

Smak: delikatnie miętowy

Pojemność: 70 g

Wskazania

ekonomiczne opakowanie XL, mocuje w 3 kierunkach, utrzymuje protezę cały dzień, zapobiega dostawianiu się resztek pokarmu pod protezę, delikatnie miętowy smak

Składniki

Calcium/sodium PVM/M copolymer, petrolatum, cellulose gum, Paraffinum Liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430

Stosowanie

Instrukcja stosowania:

Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. W razie potrzeby użyć większej ilości kremu. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji następnym razem należy zastosować mniejszą ilość kremu. Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia odpowiedniej ilości kremu dla danej protezy. Stosować raz dziennie. Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem dentystą.

Sposób aplikacji kremu:

1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku, niezbyt blisko jej krawędzi.
3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.
4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.

Sposób usuwania:

1. Przepłukać jamę ustną wodą.
2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.
3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.
4. Oczyszczyć protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega, a następnie dokładnie opłukać wodą.

Ważne

Przed użyciem przeczytaj instrukcję.

Przeciwwskazania

OSTRZEŻENIA: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności). Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to szkodliwe. Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty. Końcówka tubki i nakrętka powinny być suche aby nie spowodować zatkania tubki. Po użyciu zakręcić.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

Ważne

Znaki towarowe są własnością lub są licencjonowane przez spółki z grupy GSK. 2021 Spółki z grupy GSK lub ich licencjodawcy.

Zawartość opakowania

70

Opis

Corega Wyrób medyczny krem mocujący do protez zębowych super mocny delikatnie miętowy 70 g

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykieta.

Corega Super Mocny Delikatnie Miętowy

Przewidziane zastosowanie: Kremy do mocowania
protez zębowych
Podmiot prowadzący reklamę: Haleon Poland Sp z o.o.
Producent: Stafford-Miller (Ireland) Limited

HALEON

COREGA