

# Corega Wyrób medyczny krem mocujący do protez zębowych super mocny mocno miętowy 40 g

Cena: 22,90 zł

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	-
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-



## Opis produktu

### Wstęp

Krem mocujący do protez całkowitych i częściowych Corega Super Mocny zapewnia silne trzymanie i umocowanie protezy na cały dzień.

Tubka posiada unikalną końcówkę, która ułatwia aplikację produktu.

Stosowanie kremu mocującego Corega może pomóc zapewnić utrzymanie i stabilizację protezy, dzięki czemu można spożywać twarde i włókniste pokarmy, krem Corega pomaga także zapobiegać dostawianiu się resztek jedzenia pod protezę.

### Aplikacja kremu:

1. Protezę umyć, wysuszyć i nanieść na nią krótkie paski kremu zachowując odstęp od krawędzi.
2. Jamę ustną wypłukać, założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.
3. W celu usunięcia protezy należy jamę ustną przepłukać wodą i wyjmować protezę powoli przy jednoczesnym jej poruszaniu.
4. Pozostałości kremu usunąć z jamy ustnej i protezy przy użyciu miękkiej szczoteczki i ciepłej wody a później tabletek do czyszczenia protez.

**Smak:** mocno miętowy

Pojemność: 40g

### Wskazania

Utrzymuje protezę cały dzień, Daje większą siłę i pewność podczas jedzenia\* \*w porównaniu do używania protezy bez kremu moczującego, Mocno miętowy smak

### Składniki

calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, aroma, CI 73360, CI 15850

### Stosowanie

Instrukcja Stosowania:

Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. W razie potrzeby użyć większej ilości kremu. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji następnym razem należy zastosować mniejszą ilość kremu. Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia odpowiedniej ilości kremu dla danej protezy. Stosować raz dziennie dla bezpiecznego trzymania protezy. Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem dentystą.

Sposób aplikacji kremu:

1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku, niezbyt blisko jej krawędzi.
3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.
4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.

Sposób usuwania:

1. Przepłukać jamę ustną wodą.
2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.
3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.
4. Oczyszczyć protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega, a następnie dokładnie opłukać wodą.

Ważne

Przed użyciem przeczytaj instrukcję.

### Przeciwwskazania

OSTRZEŻENIA: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności). Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to szkodliwe. Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty. Końcówka tubki i nakrętka powinny być suche aby nie spowodować zatkania tubki. Po użyciu zakręcić.

### Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

### Ważne

Znaki towarowe są własnością lub są licencjonowane przez spółki z grupy GSK. 2020 Spółki z grupy GSK lub ich licencjodawcy

### Zawartość opakowania

40

### Opis

Corega Wyrób medyczny krem moczujący do protez zębowych super mocny mocno miętowy 40 g

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Galeria



To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z  
instrukcją użytkowania lub  
etykietą.

**COREGA SUPER MOCNY MOCNO MIĘTOWY [40g]**

Przewidziane zastosowanie: Krem do mocowania  
protez zębowych  
Podmiot prowadzący reklamę: GlaxoSmithKline  
Consumer Healthcare Sp z o.o.  
Producent: Stafford-Miller (Ireland) Limited

