

Durex Aloe Vera Żel intymny i do masażu kojący 200 ml



Cena: 37,05 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	200 ml
Postać	-
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Stosowanie

Przed użyciem Żel nadaje się do seksu waginalnego, analnego i oralnego. Może pomóc przy suchości pochwy. Odpowiedni do używania z prezerwatywami z naturalnej gumy lateksowej lub nielateksowymi poliizoprenowymi prezerwatywami.

Instrukcja używania Otwórz korek, delikatnie ściśnij butelkę i rozprowadź żel. Jeżeli używasz go razem z prezerwatywą, rozprowadź go na prezerwatywie, gdy jest już założona na członek.

Przechowywanie

Przechowuj żel w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego. Zużyj w ciągu 3 miesięcy od otwarcia.

Przeciwwskazania

KILKA OSTRZEŻEŃ Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Nie jest to środek antykoncepcyjny oraz nie zawiera środka plemnikobójczego. Może spowalniać ruchliwość plemników. Unikaj kontaktu z oczami, uszkodzoną skórą lub ranami. Zaprześć używania jeśli wystąpi podrażnienie. Skonsultuj się z lekarzem jeśli podrażnienie nie ustanie, doświadczasz ciągłej suchości pochwy, jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Produkt bezpieczny do spożycia, jednak nie jest żywnością. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie używaj z prezerwatywami poliuretanowymi.

Producent

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Ważne

Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1639

Certyfikowany za zgodność z Dyrektywą 93/42/ EWG przez SGS CE1639 w celu łagodzenia objawów suchości pochwy. Niemedyczne zastosowania produktu nie były oceniane.

Durex jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.

Zawartość opakowania

200

Opis

Durex Aloe Vera Żel intymny i do masażu kojący 200 ml

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.