


## Durex Arouser Prezerwatywy 12 sztuk

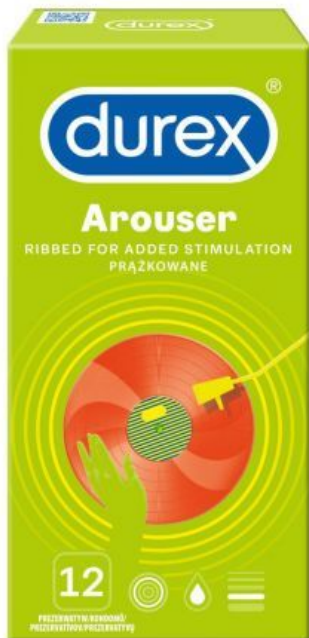

Cena: 37,91 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	12 szt.
Postać	-
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Wstęp

Prezerwatywy Durex Arouser są pokryte wyjątkowo rozmieszczonymi prążkami zapewniającymi bardziej intensywne doznania podczas stosunku, mają prostszy kształt, który gwarantuje lepsze przyleganie i dopasowanie.

Dzięki specjalnej technologii wytwarzania prezerwatywy Durex Arouser mają przyjemniejszy zapach.

Każda z prezerwatywy Durex jest w 100% testowana elektronicznie. Każda seria przechodzi 5 testów jakości.

Żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, wirusem HIV czy chorobami przenoszonymi drogą płciową.

#### Właściwości

- Szerokość nominalna 53 mm
- W kolorze koralowym, pokryte środkiem nawilżającym, zakończone zbiorniczkiem
- Proste ścianki
- Testowane dermatologicznie
- W 100% testowane elektronicznie

**Opakowanie:** 12 szt.

#### Wskazania

prążkowane

#### Stosowanie

Przed rozpoczęciem

Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na

zewnątrz prezerwatywy.

#### Utylizacja

Możesz poddać recyklingowi to pudełko, ale nie jego zawartość. Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety.

Aby ułatwić założenie, logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

#### Przed użyciem

Przed użyciem prezerwatywy sprawdź datę ważności na opakowaniu. Jeśli folijka, w której znajduje się prezerwatywa jest w widoczny sposób uszkodzona, należy ją wyrzucić i użyć nową prezerwatywę z nieuszkodzonego opakowania. Prezerwatywę należy założyć, zanim dojdzie do kontaktu członka z drugą osobą. Takie postępowanie pomaga zapobiec ciąży i możliwości zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową.

#### Instrukcja używania

1. Rozewnij folijkę od ząbkowanej krawędzi. Obchodź się ostrożnie z prezerwatywą, gdyż może zostać uszkodzona paznokciami lub ostrymi przedmiotami.
2. Upewnij się, że zrolowana krawędź jest po zewnętrznej stronie. Ściśnij końcówkę i umieść prezerwatywę na czubku członka w stanie wzwołu.
3. Rozwiń prezerwatywę na całej długości członka. Zatrzymaj się i sprawdź, czy prezerwatywa nie ześlizguje się lub nie przylega zbyt ściśle do członka, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Należy zdjąć prezerwatywę zaraz po wytrysku. Mocno przytrzymaj prezerwatywę u podstawy członka przed jego wyciągnięciem.
4. Wrzuć do kosza. Nie wyrzucaj jej do toalety.

Data opracowania instrukcji używania: maj 2016.

#### Przechowywanie

Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.

#### Przeciwwskazania

Kluczem jest wiedza i świadomość, dlatego przeczytaj instrukcję używania znajdującą się w środku, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100 % przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### KILKA OSTRZEŻEŃ

Prezerwatywa jest wykonana z naturalnego lateksu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, jeśli użytkownik jest uczulony na lateks. **ZAPRZESTAŃ UŻYWANIA:** jeśli poczujesz dyskomfort lub podrażnienie podczas używania prezerwatywy. Używaj prezerwatywy tylko raz. Ponowne użycie może zwiększać ryzyko uszkodzenia prezerwatywy i wystąpienia infekcji. Jeśli najpierw używasz prezerwatywy do seksu oralnego, należy użyć nowej prezerwatywy do każdego innego rodzaju seksu. Używaj tylko żeli intymnych zalecanych do używania z prezerwatywami. Te na bazie oleju (wazelina, oliwka dla niemowląt i niektóre pesaria) oraz niektóre leki miejscowe stosowane w okolicy członka lub pochwy mogą uszkodzić prezerwatywę. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy.

#### KIEDY NALEŻY ZASIĘGNAĆ PORADY

Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą, jeśli nie masz pewności, czy jesteś uczulony/uczulona na lateks, jeśli podrażnienie lub dyskomfort utrzymują się po użyciu lub jeśli stosowane są miejscowe leki w okolicy członka lub pochwy. Jeśli prezerwatywa pęknie lub przecieknie podczas stosunku należy jak najszybciej, w ciągu 72 godzin, skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem.

#### Producent

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

#### Ważne

Certyfikowany za zgodność z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS Belgium NV, CE 1639 jako środek antykoncepcyjny lub zapobiegający zarażeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową. Niemedyczne zastosowania produktu nie były ocenione.

Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE1639

ISO 4074

Durex i logo Durex są znakami towarowymi Reckitt Benckiser Group.

**Opis**

Durex Arouser Prezerwatywy 12 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.