

Durex Intense Wyrób medyczny prezerwatywy 10 sztuk



Cena: 48,30 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Prezerwatywy Durex Intense z naturalnego lateksu pokryte rozgrzewająco-chłodzącym i mrowiącym lubrykantem oraz prążkami i wypustkami dla zapewnienia partnerce dodatkowej stymulacji i osiągnięcia satysfakcji.

Każda z prezerwatyw Durex jest w 100% testowana elektronicznie. Każda seria przechodzi 5 testów jakości.

Żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, wirusem HIV czy chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Właściwości

- Szerokość nominalna: 56 mm
- Pokryte prążkami i wypustkami i dodatkową ilością silikonowego środka nawilżającego, zakończone zbiorniczkiem
- O kształcie easy-on
- Testowane dermatologicznie
- W 100% testowane elektronicznie

Opakowanie: 10 szt.

Wskazania

z żelem Desirex dla uczucia rozgrzania, chłodzenia i mrowienia

Stosowanie

Przed rozpoczęciem

Używaj tylko żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy.

Utylizacja

Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety.

Kluczem jest wiedza i świadomość, dlatego przeczytaj instrukcję używania znajdującą się w środku.

Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

Przed użyciem sprawdź instrukcję używania.

Przechowywanie

Przechowuj w chłodnym miejscu

Przeciwwskazania

Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100 % przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prezerwatywy mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Ważne

Certyfikowany na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS Belgium NV.

Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE1639

ISO 4074

Durex i logo Durex są znakami towarowymi grupy Reckitt.

Opis

Durex Intense Wyrób medyczny prezerwatywy 10 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.