

## Durex Mutual Pleasure Prezerwatywy 10 sztuk



Cena: 45,60 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Wstęp

Prezerwatywy Durex Mutual Pleasure stworzone, by zapewnić intensywne doznania obojgu partnerom i osiągnąć wspólny orgazm.

Prążkowana powierzchnia z wypustkami ma podkręcić jej tempo, a lubrykant z benzokainą pokrywający ścianki od wewnątrz ma zwolnić mu rytm.

Dzięki specjalnej technologii wytwarzania prezerwatywy Durex Mutual Pleasure mają przyjemniejszy zapach i nie rozpraszają.

Uwaga: Lubrykant, którym pokryte są prezerwatywy, może powodować wysypkę, podrażnienie, pieczenie lub swędzenie. Unikaj kontaktu z oczami i zmyj go po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie prezerwatywy. Jeśli problem nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy używać tych prezerwatyw, jeśli ktoś z partnerów ma podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Jeśli podczas używania tych prezerwatyw u kogoś z partnerów wystąpią problemy z oddychaniem lub sinienie warg, należy natychmiast przerwać ich stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Dla bezpieczeństwa produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od działania promieni słonecznych.

#### Właściwości:

- Szerokość nominalna 56 mm
- Przezroczyste, z naturalnego lateksu
- O kształcie easy-on, zakończone zbiorniczkiem
- Testowane dermatologicznie
- W 100% testowane elektronicznie

**Opakowanie:** 10 szt

**Stosowanie**

Przed rozpoczęciem

Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy.

Utylizacja

Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety.

Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

**Przechowywanie**

Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.

**Przeciwwskazania**

Ważne informacje

U niektórych osób lubrykant Performa, znajdujący się na tych prezerwatywach, może powodować wysypkę, podrażnienie, pieczenie lub swędzenie. Unikaj kontaktu z oczami i zmyj po użyciu. Jeśli wystąpi podrażnienie, zaprzestań używania prezerwatyw Performa. Jeśli nie nastąpi poprawa skonsultuj się z lekarzem. Nie używaj, jeśli u Ciebie lub partnera(ki) występuje stan zapalny lub uszkodzenie skóry. **NATYCHMIAST PRZESTAŃ UŻYWAĆ I WEZWIJ LEKARZA**, jeśli w trakcie używania wystąpią trudności w oddychaniu lub zasinienie ust. Przedwczesny wytrysk jest częstym problemem, który może mieć wiele przyczyn i może wymagać konsultacji/opieki medycznej. Jeśli te prezerwatywy nie pomogą, skontaktuj się z lekarzem. Przeczytaj instrukcję używania, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Producent**

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

**Ważne**

Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE2409

ISO 4074

**Opis**

Durex Mutual Pleasure Prezerwatywy 10 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.