


# Durex Performa Prezerwatywy 12 sztuk

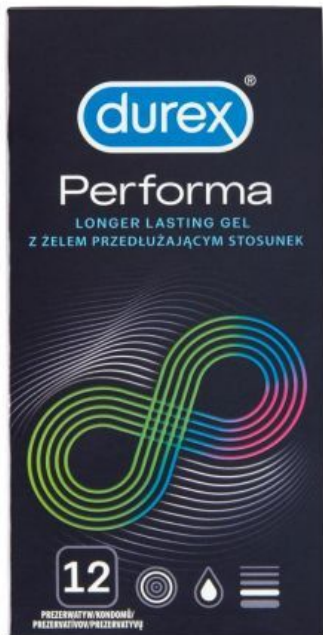

Cena: 46,08 zł

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	12 szt.
Postać	-
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Wstęp

Prezerwatywy Durex Performa pokryte są od wewnątrz specjalnym lubrykantem - benzokainą (5%), który pozwala na opóźnienie wytrysku i przedłużenie stosunku, co oznacza dłuższą przyjemność.

Uwaga: Lubrykant, którym pokryte są prezerwatywy, może powodować wysypkę, podrażnienie, pieczenie lub swędzenie. Unikaj kontaktu z oczami i zmyj go po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie prezerwatywy. Jeśli problem nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy używać tych prezerwatyw, jeśli któreś z partnerów ma podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Jeśli podczas używania tych prezerwatyw u któregoś z partnerów wystąpią problemy z oddychaniem lub sinienie warg, należy natychmiast przerwać ich stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Dzięki specjalnej technologii wytwarzania prezerwatywy Durex Performa mają przyjemniejszy zapach.

Każda z prezerwatyw Durex jest w 100% testowana elektronicznie. Każda seria przechodzi 5 testów jakości.

Żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, wirusem HIV czy chorobami przenoszonymi drogą płciową.

### Właściwości

- Szerokość nominalna 56 mm
- Specjalny lubrykant wydłużający stosunek. Zawiera benzokainę 5%
- Przezroczyste, pokryte środkiem nawilżającym, zakończone zbiorniczkiem
- O kształcie easy-on

- Testowane dermatologicznie
- W 100% testowane elektronicznie

**Opakowanie:** 12 szt.

#### **Wskazania**

z żelem przedłużającym stosunek

#### **Stosowanie**

Przed rozpoczęciem

Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy.

#### **Utylizacja**

Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety.

Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

#### **Przechowywanie**

Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.

#### **Przeciwwskazania**

##### **Ważne informacje**

U niektórych osób lubrykant Performa, znajdujący się na tych prezerwatywach, może powodować wysypkę, podrażnienie, pieczenie lub swędzenie. Unikaj kontaktu z oczami i zmyj po użyciu. Jeśli wystąpi podrażnienie, zaprzestań używania prezerwatyw Performa. Jeśli nie nastąpi poprawa skonsultuj się z lekarzem. Nie używaj, jeśli u Ciebie lub partnera(ki) występuje stan zapalny lub uszkodzenie skóry. **NATYCHMIAST PRZESTAŃ UŻYWAĆ I WEZWIJ LEKARZA**, jeśli w trakcie używania wystąpią trudności w oddychaniu lub zasinienie ust. Przedwczesny wytrysk jest częstym problemem, który może mieć wiele przyczyn i może wymagać konsultacji/opieki medycznej. Jeśli te prezerwatywy nie pomogą, skontaktuj się z lekarzem. Przeczytaj instrukcję używania, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### **Producent**

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

#### **Ważne**

Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE2409

ISO 4074

#### **Opis**

Durex Performa Prezerwatywy 12 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.