

# Durex Warming Żel intymny rozgrzewający 50 ml



Cena: 18,91 zł

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 ml
Postać	-
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Wstęp Opis

Durex Warming żel intymny rozgrzewający i potęgujący doznania rozgrzewa skórę podczas kontaktu i zapewnia nawilżenie i uwrażliwienie skóry oraz uczucie przyjemnego ciepła w miejscu aplikacji.

Żel ma jedwabistą konsystencję, a jego receptura opiera się na wodzie. Może być bezpiecznie używany z prezerwatywami.

Produkt dostarcza niesamowitych, gorących doznań, ale także pomaga złagodzić dyskomfort spowodowany suchością pochwy, ułatwiając i uprzyjemniając seks.

### Dlaczego warto stosować lubrykanty?

Stosowanie lubrykantów jest pomocne gdy ciało może nie wytwarzać wystarczającego nawilżenia, kilka kropli lubrykantu wystarczy by sprawy potoczyły się gładko.

Lubrykanty Durex na bazie wody są bezpieczne dla prezerwatyw, natomiast produkty na bazie oleju mogą je uszkodzić, dlatego przed użyciem zawsze należy upewnić się jakiego produktu się używa.

**Opakowanie:** 50 ml

### Stosowanie

Przed użyciem: Żel nadaje się do seksu waginalnego, analnego i oralnego. Może pomóc przy suchości pochwy. Odpowiedni do używania z prezerwatywami z naturalnej gumy lateksowej lub nieateksowymi poliizoprenowymi oraz poliuretanowymi prezerwatywami.

Instrukcja używania: Otwórz korek, delikatnie ściśnij butelkę, aby zaaplikować żel. Jeżeli używasz go razem z prezerwatywą, rozprowadź go na prezerwatywie, gdy jest już założona na członek.

Data opracowania instrukcji używania: wrzesień 2019 r.

**Przechowywanie**

Przechowuj żel w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego. Zużyj w przeciągu 3 miesięcy od otwarcia.

**Przeciwwskazania**

Kilka ostrzeżeń: Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Nie jest to środek antykoncepcyjny oraz nie zawiera środka plemnikobójczego. Może spowalniać ruchliwość plemników.

Unikaj kontaktu z oczami, uszkodzoną skórą lub ranami. Zaprześć użycia, jeśli wystąpi podrażnienie. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustanie, doświadczasz ciągłej suchości pochwy, jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Producent**

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

**Ważne**

Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1639

Durex jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.

Certyfikowany za zgodność z Dyrektywą 93/42/ EWG przez SGS CE1639 w celu łagodzenia objawów suchości pochwy. Niemedyczne zastosowania produktu nie były oceniane.

**Zawartość opakowania**

50

**Opis**

Durex Warming Żel intymny rozgrzewający 50 ml

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.