

# Frida Baby NoseFrida Aspirator do nosa



Cena: 29,00 zł

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PROFIMED SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Wstęp

#### Wskazania

0+ miesięcy, wolny od BPA i ftalanów, łatwy w czyszczeniu, nieinwazyjny

#### Stosowanie

Jak używać: Aby zapobiec przenoszeniu się wydzieliny lub bakterii, powinien być założony jednorazowy filtr. Należy przyłożyć grubą rurkę do nozdrza dziecka tak, aby szczelnie przylegała (nie wkładać do wewnątrz). Czerwony ustnik używa się do wysysania śluzu.

Wskazówki: (1) Przed użyciem Nosefrida wprowadzić roztwór soli fizjologicznej do każdego otworu nosowego, co pomoże w rozrzedzeniu gęstej wydzieliny. (2) Rurkę należy poruszać okrężnymi ruchami w otworze nosowym - wydzielina usuwana z nosa będzie widoczna, jak również będzie to słychać. (3) Filtr należy zmienić po każdorazowym użyciu, aby zapewnić efektywne odsysanie.

Jak czyścić: Usunąć filtr. Umyć grubą rurkę mydłem i wodą. Cienką rurkę wyczyścić używając kilku kropli alkoholu izopropylowego. Mocno złączyć obie osuszone części, wsunąć nowy filtr przed następnym użyciem.

Można myć w zmywarce na górnej półce

#### Przeciwwskazania

Bezpieczeństwo: Rurki nie wkłada się do środka nosa, aby dziecka nie zranić w przypadku gdy się poruszy. NoseFrida używać wyłącznie do oczyszczania nosa - nie używać do uszu lub gardła. NIE DMUCHAĆ do czerwonego ustnika gdy rurka jest umieszczona w nosie dziecka. NoseFrida NIE jest zabawką - trzymać wszystkie części z dala od dzieci. Nigdy nie podłączać przyrządu NoseFrida do maszyny.

#### Producent

Profimed Sp. z o.o.

**Ważne**

Frida Baby, Frida i wszystkie inne znaki towarowe są zarejestrowanymi i niezastrzeżonymi znakami Fridababy, LLC, Fridababy, LLC 2020

**Opis**

Frida Baby NoseFrida Aspirator do nosa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.