

## Gruszka z miękkim końcem nr 7 APTEO, 1 szt.



Cena: 5,50 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Wstęp

Gruszka z miękkim końcem nr 7 APTEO zalecana do stosowania u dzieci od 6. miesiąca do 1. roku życia.

Gruszkę stosuje się w celu zapobiegania:

- stanom zapalnym uszu, poprzez usuwanie wody i woskowiny
- infekcjom górnych dróg oddechowych poprzez usuwanie wydzieliny kataralnej z nosa

#### Sposób użycia:

##### Stosowanie do nosa:

Gruszkę ścisnąć w dłoni, a następnie miękką końcówkę przyłożyć do otworu nosowego i uwolnić gruszkę z uścisku. Następuje zasysanie wydzieliny z nosa.

##### Stosowanie do uszu:

Gruszką zassać niewielką ilość letniej wody, przechylić głowę na bok i zakropić ciecz do ucha. Nie wprowadzać głęboko miękkiej końcówki - należy pozwolić, aby woda powoli spłynęła po ściance kanału słuchowego. Następnie przechylić głowę w przeciwną stronę, aby pozbyć się cieczy. Czynność powtórzyć.

Przed każdym użyciem i po użyciu gruszkę umyć w ciepłej wodzie z mydłem i włożyć do gotującej się wody na 10 minut.

#### Środki ostrożności:

- Produkt do indywidualnego użytku.
- Nie stosować środków dezynfekujących.
- Wszelkie czynności związane z użytkowaniem gruszki z miękkim końcem powinna wykonywać osoba dorosła
- Gruszki PVC używać w sposób bardzo ostrożny, w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Opakowanie: 1 sztuka

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.