

IGLESSY Sterylne igły do penów 31G 0,25x5mm



Cena: 18,89 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 szt.
Postać	igła
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Igły do penów

Opis produktu

Opis

Sterylnie jednorazowe igły do penów insulinowych.

Rozmiar: 31G 0,25 x 5 mm (kolor fioletowy)

Właściwości:

Kompatybilne z większością powszechnie stosowanych wstrzykiwaczy dostępnych na rynku (kompatybilność podana na opakowaniu)

Obustronne ostrzenie igły - Double point system

Sterylnie, nietoksyczne, cienkościenne

Czytelne opisy na opakowaniu

Trzyplaszczynowe ostrze

5-letni okres ważności produktu

Zgodne z normą europejską EN ISO 11608-2:2012

Powłoka silikonowa przyczyniająca się do zmniejszenia bólu odczuwanego przez pacjenta

Kolorystyka na opakowaniach i pojedynczych igłach pozwala rozróżnić rozmiar igieł

Sposób użycia igły

1. Pociągnąć za etykietkę, aby usunąć ją z igły do wstrzykiwacza.
2. Przymocować igłę do wstrzykiwacza, a następnie przekreślić, aby zabezpieczyć połączenie.
3. Zdjąć zewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza.
4. Zdjąć wewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi wstrzykiwania insuliny.
5. Założyć osłonę zewnętrzną na igłę do wstrzykiwacza oraz wstrzykiwacz.
6. Wyrzucić igłę do wstrzykiwacza do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Opakowanie: 100 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.