

IGLESSY Sterylne igły do penów 32G 0,23x4mm



Cena: 18,89 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 szt.
Postać	igła
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Igły do penów

Opis produktu

Wstęp

Sterylnie jednorazowe igły do penów insulinowych.

Rozmiar: 32G 0,23 x 4 mm (kolor zielony)

Właściwości:

Kolorystyka na opakowaniach i pojedynczych igłach pozwala rozróżnić rozmiar igieł
Kompatybilne z większością powszechnie stosowanych wstrzykiwaczy dostępnych na rynku (kompatybilność podana na opakowaniu)
Powłoka silikonowa przyczyniająca się do zmniejszenia bólu odczuwanego przez pacjenta
Sterylnie, nietoksyczne, cienkościenne
Obustronne ostrzenie igły - Double point system
Czytelne opisy na opakowaniu
Trzyplaszczynowe ostrze
5-letni okres ważności produktu
Zgodne z normą europejską EN ISO 11608-2:2012

Sposób użycia igły

1. Pociągnąć za etykietkę, aby usunąć ją z igły do wstrzykiwacza.
2. Przymocować igłę do wstrzykiwacza, a następnie przekreślić, aby zabezpieczyć połączenie.
3. Zdjąć zewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza.
4. Zdjąć wewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi wstrzykiwania insuliny.
5. Założyć osłonę zewnętrzną na igłę do wstrzykiwacza oraz wstrzykiwacz.
6. Wyrzucić igłę do wstrzykiwacza do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Opakowanie: 100 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.