

## Komora inhalacyjna Intec Spiro Kid, 1 szt.

Cena: 79,50 zł



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	INTEC MEDICAL SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Wstęp

Komora inhalacyjna służąca do zwiększenia efektywności podawania leków do układu oddechowego dedykowana dla każdej grupy wiekowej, zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.

Jest to wyrób medyczny służący do podawania leków wziewnych, którego zadaniem jest zwiększenie ilości efektywnie podanego do układu oddechowego i do płuc leku, co pozwala na zwiększenie skuteczności terapii leczniczej.

Komora inhalacyjna Intec Spiro Kid jest antystatyczna i przezroczysta, ma pojemność 175 ml i wykonana jest z wysokiej jakości materiału termoplastycznego. Produkt zaprojektowano by ułatwić efektywne stosowanie leków zarówno w domu, jak i podczas wyjazdów. Dodatkowymi atutami są łatwość czyszczenia oraz wygodny transport. Wyrób ten jest mniejszy niż większość dostępnych na rynku inhalatorów oraz posiada dodatkowe zaawansowane funkcjonalności.

Produkt posiada zamontowany gwizdek wysokiego przepływu, dzięki któremu dzieci mogą szybko nauczyć się prawidłowego oddechu podczas inhalacji. Za każdym razem kiedy dziecko dokonuje zbyt gwałtownego wdechu, urządzenie sygnalizuje to krótkim dźwiękiem, co ma na celu skuteczniejsze przyjmowanie leku. Prawidłowy wdech podczas inhalacji leku z komory, powinien być, spokojny, głęboki, powolny - gwizdek wysokiego przepływu powinien milczeć.

Komora oprócz zastawki wdechowej, posiada także zastawkę wydechową, co nie pozwala zasysać „obcego” powietrza do komory, dzięki czemu chory inhaluje tylko lek, a wydychane powietrze odprowadzane jest bezpośrednio poza komorę.

Zestaw zawiera dwie, nie zawierające lateksu silikonowe maseczki mające różne rozmiary (dla niemowląt i dla starszych dzieci) oraz wbudowany ustnik dla osób dorosłych, opracowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania przy optymalnym uszczelnieniu oraz zintegrowane z komorą mocowanie dozownika z lekiem w aerozolu.

#### Wyposażenie:

- komora inhalacyjna
- maseczka dla niemowląt
- maseczka dla dzieci

- wbudowany ustnik dla osób dorosłych
- mocowanie na lek w aerozolu zintegrowane z komorą

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.