

Kompresy ThermaCare rozgrzewające na plecy, 4 szt.



Cena: 63,70 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	4 szt.
Postać	-
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Anatomicznie ukształtowane kompresy rozgrzewające na plecy i biodra zawierające 16 opatentowanych komórek ciepłych, odpowiednie do stosowania w celu łagodzenia bólu mięśni oraz stawów, a także sztywności mięśni w dolnej części pleców i stawów biodrowych.

Po około 30 minutach ogrzewania kompres rozgrzewający osiąga temperaturę terapeutyczną ok. 40°C, która utrzymuje się na stałym poziomie przez około 8 godzin. W celu skutecznego działania przeciwbólowego kompres należy nosić w sposób ciągły (nie zdejmować) do 8 godzin w ciągu doby. Kompresy łagodzą ból także przez czas 8 godzin po ich zdjęciu, dzięki czemu przynoszą długotrwałą ulgę w bólu - do 16 godzin.

Kompresy posiadają wykonany z elastycznego materiału pas na rzepy, który umożliwia regulację rozmiaru i dopasowanie do obwodu talii (do 120 cm).

Zastosowanie:

W przypadku odczuwania bólu powodowanego przez

- sztywność mięśni,
- napięcie mięśniowe,
- zapalenie stawów,
- przeciążenie i nadwyrężenie.

Kompresy rozgrzewające można stosować zarówno w przypadku przewlekłego, jak i sporadycznego bólu.

Wyrób nie zawiera substancji leczniczych.

Sposób użycia:

1. Bezpośrednio przed użyciem otworzyć opakowanie kompresu rozgrzewającego. Komórki ciepłe wyrobu ogrzewają się w momencie gdy wejdą w kontakt z tlenem.
2. Całkowicie rozłożyć kompres. Dzięki elastycznej regulacji pasa i dużej powierzchni rzepa produkt dopasowuje się do obwodu talii.

- Umieścić kompres w miejscu bólu, ciemniejszymi komórkami ciepłymi skierowanymi w stronę skóry.
- Zapiąć rzep z przodu ciała i dopasować powłokę pociągając ją nieco w dół, tak aby przylegała do bolesnego obszaru ciała.

Środki ostrożności:

Kompresów rozgrzewających na plecy i biodra nie należy stosować na zmienioną chorobowo, zranioną lub uszkodzoną skórę, na siniaki oraz obrzęki lub na części ciała nie odczuwające ciepła.

Nie ogrzewać kompresów rozgrzewających w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani w żaden inny sposób.

Nie należy nawilżać ani myć kompresów rozgrzewających, gdyż spowoduje to nieskuteczność komórek ciepłych.

Kobiety w ciąży, osoby cierpiące na chorobę serca, problemy z krążeniem, cukrzycę lub reumatoidalne zapalenie stawów stosowanie kompresów rozgrzewających ThermaCare® na plecy i biodra powinny najpierw skonsultować z lekarzem.

Ze względu na wzrost ryzyka oparzeń wraz z wiekiem, osoby powyżej 55. roku życia nie powinny nosić kompresów ThermaCare® podczas snu.

Maksymalny obwód: 120 cm (XXL)

Opakowanie: 4 sztuki

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.