

Kompresy ThermaCare rozgrzewające na szyję, 2 szt.

Cena: 29,00 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	2 szt.
Postać	-
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Kompresy rozgrzewające ThermaCare® na szyję i ramiona zawierające 10 opatentowanych komórek ciepłych, mocowane na dwie taśmy samoprzylepne zalecane do stosowania w przypadku nieswoistego bólu mięśni i stawów w okolicy szyi i ramion.

Wyrób ma ergonomiczny kształt umożliwiający dobre dopasowanie się do ciała i precyzyjne umieszczenie na bolesnej okolicy szyi i ramion.

Po około 30 minutach ogrzewania kompres rozgrzewający osiąga temperaturę terapeutyczną ok. 40°C, która utrzymuje się na stałym poziomie przez około 8 godzin. W celu skutecznego złagodzenia bólu kompres należy nosić w sposób ciągły (nie zdejmować).

Zastosowanie:

Ból mięśni i stawów spowodowany przez

- przeciążenie i nadwyrężenie,
- napięcie mięśniowe,
- zapalenie stawów,
- skręcenie.

Kompresy rozgrzewające można stosować zarówno w przypadku przewlekłego, jak i sporadycznego bólu. Produkt nie nadaje się do leczenia ostrego stanu zapalnego lub obrzęku.

Wyrób nie zawiera substancji leczniczych.

Sposób użycia:

1. Bezpośrednio przed użyciem otworzyć opakowanie kompresu rozgrzewającego. komórki ciepłe wyrobu ogrzewają się w momencie gdy wejdą w kontakt z tlenem.
2. Usunąć z kompresu folię ochronną tak aby odstąpić 2 przylepne powierzchnie, uważając by nie dotknąć powierzchni przylepnej i nie osłabić klejącego działania.
3. Obręcz chwycić kompres i trzymać go przed sobą tak aby jego czubek skierowany był ku górze. Przylepne powierzchnie skierować

do siebie.

4. Umieścić kompres na bolesnym, odstąpiętym obszarze szyi lub barków. Gdy plaster będzie na szyi czubek powinien być skierowany w dół w kierunku pleców.

5. Wygładzić kompres aby dobrze przylegał do ciała i przymocować powierzchnie przylepne do skóry.

Środki ostrożności:

Kompresów rozgrzewających na szyję i ramiona nie należy stosować na zmienioną chorobowo, zranioną lub uszkodzoną skórę, na siniaki oraz obrzęki lub na części ciała nie odczuwające ciepła.

Nie ogrzewać kompresów rozgrzewających w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani w żaden inny sposób.

Nie należy nawilżać ani myć kompresów rozgrzewających, gdyż spowoduje to nieskuteczność komórek ciepłych.

Ze względu na wzrost ryzyka oparzeń wraz z wiekiem, osoby powyżej 55. roku życia nie powinny nosić kompresów ThermaCare® podczas snu.

Kobiety w ciąży, osoby cierpiące na chorobę serca, problemy z krążeniem, cukrzycę lub reumatoidalne zapalenie stawów stosowanie kompresów rozgrzewających ThermaCare® na szyję i ramiona powinny najpierw skonsultować z lekarzem.

Obszar ogrzewania: 29 x 6,5 cm

Czas wytwarzania ciepła: do 8 godzin

Opakowanie: 2 sztuki

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.