

Lancety OPTILETS, 200 szt.



Cena: 38,00 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	200 szt.
Postać	-
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

Jednorazowe, sterylne lancety do nakłuwacza OPTILET Mini lub OPTILET Pro do punktowego nakłuwania skóry w celu pobrania próbki krwi kapilarnej.

Sposób użycia:

1. Umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i osuszyć je ręcznikiem.
2. Umieścić lancet w nośniku nakłuwacza.
3. Usunąć nasadkę zabezpieczającą.
4. Wybrać miejsce nakłucia.
5. Wykonać nakłucie.
6. Wykonać pomiar poziomu glukozy zgodnie z instrukcją i oczyścić miejsce nakłucia.
7. Założyć nasadkę zabezpieczającą i wyrzucić lancet do odpowiedniego pojemnika.

Lancety są wyrobem jednorazowego użytku, nie należy ponownie używać tego samego lancetu. Użycie ponowne tej samej igły wiąże się z podwyższonym ryzykiem zakażenia mikrobiologicznego.

Aby zmniejszyć ryzyko infekcji należy:

Przed pobraniem próbki umyć miejsce nakłucia wodą i mydłem.
Utrzymywać urządzenie w czystości. Produkty kosmetyczne, olejki, zanieczyszczenia, pył mogą spowodować jego nieprawidłową pracę.
Zawsze używać nowego, czystego lancetu. Lancety są jednorazowe.

Środki ostrożności:

Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nakłuwacz, nasadka, lancety i osłona nakłuwacza stwarzają zagrożenie uduszenia.
Nie używać jeśli nasadka jest uszkodzona. Nie przechowywać lancetu w nakłuwaczu.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem.

Opakowanie: 200 szt.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.