

## Opatrunek UrgoClean 6 x 6cm, 1 szt.



Cena: 5,70 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Emplastry antimicrobiotica

### Opis produktu

Opatrunek UgoClean o działaniu oczyszczającym ranę zbudowany z włókien poliabsorbentu i gojącej macierzy TLC (technologia lipidokoloidowa) wskazany do stosowania w fazie oczyszczania rany.

#### Wskazania:

- rany ostre: rany pourazowe, rany pooperacyjne, oparzenia, otarcia skóry
- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych
- rany nowotworowe

#### Właściwości:

- dzięki żelującej matrycy TLC utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko rany
- wykazuje kompleksowe działanie oczyszczające - usuwa z rany wysięk, martwicę rozpułwną i obumarłe tkanki
- dzięki wysokochłonnym właściwościom włókien poliakrylanu, pochłania i wiąże bakterie
- wchłania wysięk wertykalnie i utrzymuje go w swojej strukturze zapewniając jednocześnie ochronę skóry wokół rany
- stymuluje proliferację fibroblastów
- ma właściwości hemostatyczne
- jest odporny na rozciąganie, można go bezboleśnie i bezurazowo zdjąć w jednej części
- nie przywiera do rany i nie niszczy nowo powstałej tkanki
- może być używany w terapii kompresyjnej
- przebadany klinicznie

#### Sposób aplikacji:

Oczyścić ranę roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej zastosowano antyseptyk, ranę przepłukać solą fizjologiczną. Z opatrunku zdjąć folię ochronną i zaaplikować go bezpośrednio na ranę "lepka" stroną zwróconą w stronę rany. Jeśli opatrunek jest za duży można go przyciąć, tak aby był ok. 1-2 cm większy od brzegów rany.

Opatrunek w fazie oczyszczania z tkanek martwiczych należy zmieniać co 1-2 dni, w kolejnych etapach, w zależności od stanu klinicznego rany i wysięku opatrunek zmieniać w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż co 7 dni.

UrgoClean stosować należy z opatrunkiem wtórnym. W zależności od stopnia wysięku i umiejscowienia rany można go dopasować spośród nieprzylepnych opatrunków piankowych UrgoTul Absorb lub absorpcyjnych z silikonowym przylepcem UrgoTul Absorb Border.

**Rozmiar:** 6x6 cm

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.