

Paski do zamykania ran 6 x 75mm APTEO, 3 paski



Cena: 4,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 sasz.
Postać	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wytrzymałe paski do zabezpieczenia i zamykania ran różnej długości, sprawdzające się również w przypadku drobnych skaleczeń oraz regularnych ran ciętych.

Sposób użycia:

1. Oczyszczyć ranę i skórę jej w pobliżu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
2. Wyciągnąć paski z saszetki, bezpośrednio przed użyciem odklejać pojedynczo z papieru ochronnego.
3. Zbliżyć starannie do siebie oba brzegi rany i rozpoczynając od środka, umieścić pierwszy pasek prostopadle do rany. Unikać naprężania podczas przyklejania.
4. Przykleić kilka pasków około 2-3 mm od siebie.
5. Aby usunąć pasek, odklej ostrożnie oba końce w kierunku zranionego miejsca.

Opatrunek należy zmieniać co 24 godziny lub jeśli zamoknie.

Środki ostrożności:

Zużyć natychmiast po otwarciu saszetki.

Nie stosować na poważne, głębokie i rozległe rany.

W przypadku nadmiernego krwawienia z rany, podrażnienia lub zakażenia skóry, należy usunąć pasek.

Przed zastosowaniem u osób chorujących na cukrzycę należy skontaktować się z lekarzem.

Opakowanie: 1 saszetka - 3 paski (6 x 75 mm)

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.