

Paski do zamykania ran 6mm x 75mm APTEO CARE, 3 paski



Cena: 5,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	3 szt.
Postać	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Paski do zamykania ran wykonane z włókny poliamidowo-poliestrowej przeznaczone do zabezpieczania i zamykania ran o różnej długości.

Odpowiednie również do stosowania do zamykania ran ciętych regularnych i przy drobnych skaleczeniach.

Sposób użycia:

1. Oczyszczyć i osuszyć ranę oraz skórę wokół niej.
2. Otworzyć opakowanie i wyjąć sterylne paski i odkleić je od papierowego nośnika.
3. Paski naklejać prostopadle do brzegów rany rozpoczynając od środkowej jej części.
4. Umieścić paski w odległości 2-3 mm od siebie.

Rozmiar: 6 x 75 mm

Opakowanie: 3 paski

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.