

Protefix Podściółki mocujące do protez zębowych (dla szczęki), 30 szt.

Cena: 23,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Protefix - Podściółki mocujące do całkowitych protez zębowych (dla szczęki).

Podściółki mocujące Protefix® należy zmieniać co najmniej raz dziennie i dbać o higienę jamy ustnej i protezy.

Właściwości:

- pewnie mocują protezę
- chronią przed uciskiem
- nie zmieniają odczuć smakowych
- zabezpieczają przy odchyleniach w w anatomii zgryzu

Sposób użycia:

1. Sprawdzić wielkość protezy: przy małych protezach należy przyciąć podściółkę odpowiednio nożyczkami wzdłuż jej prostego brzegu.
2. Pościółkę zwilżyć zanurzając ją na ok. 10 sekund w letniej wodzie po czym wyjąć ją i pozwolić wodzie obcieknąć.

3. Produkt nałożyć dowolną stroną na zwilżoną protezę. Tylne 2 mm protezy musi pozostać nieprzykryte.
4. Podściółkę docisnąć zaczynając od środka w kierunku obrzeży aż będzie gładko przylegać w każdym miejscu.

Nie używać po upływie terminu ważności.

Produktu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład: 100 g podściółki zawiera: alginian sodowy 28 g, włókna wiskozowo-polipropylenowe 72 g.

Opakowanie: 30 szt

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.