

San Seni Plus Pieluchy anatomiczne dla dorosłych 30 sztuk



Cena: 84,55 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

San Seni Plus to oddychające pieluchy anatomiczne przeznaczone dla osób dorosłych o chłonności 8/9 kropli odpowiedniej przy nasilonym nietrzymaniu moczu np. przy przyjmowaniu leków moczopędnych, zwiększonej ilości płynów, czy cukrzycy.

Pieluchy San Seni Plus polecane są zwłaszcza dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim nietrzymaniem moczu poruszającym się na wózku inwalidzkim, otyłym i trwale unieruchomionym.

Produkt nie ma własnego systemu mocowania, należy je stosować razem z podtrzymującymi majtkami siatkowymi.

Właściwości:

Dopasowanie do ciała – mocowanie za pomocą elastycznych majtek podtrzymujących pozwala na stosowanie przez osoby, które nie mogą dopasować innego produktu.

Wysoka chłonność – wkład chłonny i specjalna włóknina dystrybucyjna sprawiają, że pieluchomajtki są w stanie szybko rozprowadzić wilgoć, wchłonąć większą ilość moczu i zatrzymać go wewnątrz.

Kontrola zapachu – dzięki superabsorbentowi zawartemu we wkładzie chłonnym pieluchy San Seni zapewniają nie tylko suchość, ale także neutralizację nieprzyjemnego zapachu moczu.

Wskaźnik wilgotności – oznaczenie umieszczone na zewnętrznej stronie pieluch informuje o stopniu napełnienia pieluchy i konieczności jej zmiany.

Miękkość i delikatność - produkt wykonany z miękkiego, delikatnego dla skóry i oddychającego materiału bez zawartości lateksu.

Produkt testowany dermatologicznie.

Produkty Seni rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Sposób użycia:

Przed założeniem pieluchę należy aktywować, dzięki czemu, stanie się bardziej miękka, a wkład bardziej chłonny.

1. Rozłożyć pieluchę, chwycić ją za dwa końce i lekko pociągnąć
2. Złożyć pieluchę wzdłuż na pół i lekko rozciągnąć. Rozłożyć ją, chwycić za dwa końce i lekko pociągnąć.
3. Opuścić majtki siatkowe do połowy ud.
4. Aktywowaną pieluchę włożyć między nogi chłonna warstwą do góry. Szersza część powinna znaleźć się z tyłu.
5. Dopasować pieluchę do ciała, rozprostowując przednią i tylną część, upewniając się że dobrze leży w kroku i przylega do ciała.
6. Przytrzymując pieluchę naciągnąć majtki siatkowe, poprawić pieluchę i upewnić się, że jej brzegi nie są podwinięte.
7. Zużyta pieluchę zwinąć i wyrzucić do kosza na śmieci. Nie wyrzucać zużytego wyrobu do toalety.

Chłonność: 8/9

Opakowanie: 30 sztuk