

## Scholl Żelowe kliny międzypalcowe



Cena: 29,90 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	3 szt.
Postać	-
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Wstęp

#### Wskazania

amortyzacja ucisku, natychmiastowa ulga przeciw bolesnym uciskom i otarciom, chroni bolące miejsca między palcami

#### Stosowanie

W jaki sposób i kiedy używać żelowych klinów międzypalcowych?

- Umieścić między palcami dłuższą krawędzią do góry.
- Zdejmować na noc.

#### Instrukcja mycia:

Myć ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego mydła. Dokładnie wypłukać, pozostawić do wyschnięcia.

#### Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i z dala od promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### Przeciwwskazania

Uwaga: Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować na chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę. Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone. Nie używać z innymi produktami do stóp. Natychmiast zaprzestać stosowanie, jeśli nastąpiło podrażnienie skóry podczas używania produktu.

#### Scholl i diabetycy

Jeśli jesteś diabetykiem, przed użyciem tego produktu SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM, ponieważ Twoje stopy mogą wymagać profesjonalnej opieki medycznej.

**Producent**

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

**Opis**

Scholl Żelowe kliny międzypalcowe

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.