

# Sutricon Silikonowe plastry na blizny 3 cm x 10 cm 5 sztuk

Cena: 85,00 zł



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Wstęp

### Wskazania

blizny stare i nowe, aktywne działanie w dzień i w nocy, technologia rekomendowana przez ekspertów, potwierdzona skuteczność w walce z bliznami, redukuje widoczność blizny, rozjaśnia i wygładza bliznę

### Stosowanie

#### Sposób użycia

Silikonowe plastry Sutricon® można zastosować po całkowitym zagojeniu rany lub po zdjęciu szwów (kiedy zejść wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka).

Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.

1. Plaster silikonowy należy dociąć do wielkości blizny, z uwzględnieniem 5 mm marginesu z każdej strony.
2. W zależności od wielkości blizny, jedno opakowanie starcza na około 1-3 miesiące terapii. Przy bliznie o rozmiarach 0,5 x 14 cm z jednego, dużego opakowania można uzyskać 30 mniejszych plastrów. Stosując jeden plaster silikonowy przez 5 dni, opakowanie wystarczy na 150 dni terapii.
3. Aktywne działanie przez cały dzień. Plastry silikonowe na blizny Sutricon® można nosić przez całą dobę. Jednak przynajmniej raz na dobę należy je zdjąć, bliznę umyć neutralnym mydłem, wysuszyć i nałożyć ten sam plaster ponownie.
4. Jeden plaster Sutricon® można nosić do 5 dni, jeśli jest zachowany w czystości oraz utrzymuje właściwości adhezyjne. Uwaga! Plastra nie należy myć ani zaklejać dodatkowym opatrunkiem.

#### Czas terapii:

Efekty można zaobserwować już po miesiącu, jednak pełna kuracja jest dłuższa i zależy od wielu czynników indywidualnych. Najważniejsze to wielkość i rodzaj blizny, a także uwarunkowania genetyczne. Blizny najszybciej goją się u dzieci, natomiast u osób starszych czas potrzebny na pełną regenerację skóry jest najdłuższy. Aby osiągnąć zadowalające efekty, należy stosować preparat regularnie i postępować zgodnie z instrukcją użytkowania. Długość terapii to średnio: min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych oraz min.

6 miesięcy w przypadku blizn starszych. Przy skłonnościach do nieprawidłowego bliznowacenia, np. keloidów czy bliznowców zaleca się stosowanie plastrów Sutricon przez cały okres przebudowy blizny, nawet do 12 miesięcy.

**PRZECIWWSKAZANIA:** Plastry Sutricon® nie mogą być stosowane na: rany otwarte, rany sączące, oparzenia, błony śluzowe.

**DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:** Nie zaobserwowano działań niepożądanych.

#### **Przeciwwskazania**

Ostrzeżenie: zajrzyj do załączonych dokumentów (instrukcji używania)

#### **Producent**

VercO S.A.

#### **Opis**

Sutricon Silikonowe plastry na blizny 3 cm x 10 cm 5 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.