

Termometr bezdotykowy VivaGuard FT 100C



Cena: 129,00 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PMT SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

Bezdotykowy termometr na podczerwień VivaGuard FT 100C do pomiaru temperatury na czole, który daje szybki wynik pomiaru temperatury ciała.

Termometr na podczerwień do pomiaru temperatury ciała na podstawie temperatury mierzonej na czole nie służy do badania pomiaru temperatury ciała spod pachy.

Przed pomiarem ważne jest aby:

- badany obszar był suchy, wystarczy przetrzeć dłonią czoło, aby uniknąć zakłóceń pomiaru,
- upewnić się że pole odbioru temperatury (czujka) nie zostało zabrudzone,
- dla uzyskania pełnej dokładności termometr powinien przed użyciem znajdować się w temperaturze otoczenia tzn. być wyciągnięty z szuflady, a nawet z etui,
- odległość pomiaru bezdotykowego wynosiła 2 cm, im dalej od ciała, tym odczyt może być mniej prawdziwy,
- nie używać termometru w przeciągu.

Parametry techniczne:

Tryb pomiaru: na czole
Tryb pracy 32–43 ° C (89,6 - 109,4 ° F)
Odległość pomiaru: 2 cm
Szybkość pomiaru 0,5 sekundy
Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1 ° C / ° F
Precyzja: 36 - 39 ° C (96,8 - 102,2 ° F): ± 0,2 ° C (± 0,36 ° F)
Wymiary: 162 x 50 x 35 mm
Podświetlenie: niebieskie, zielone lub czerwone

Zakres działania urządzenia:

Temperatura: 16 - 40 ° C (60,8 - 104 ° F)
Wilgotność: ≤ 85% RH

Warunki przechowywania urządzenia:

Temperatura: -25 - 55 ° C (-13 - 131 ° F)
Wilgotność: ≤ 95% RH
Baterie: 2 x 1,5 V AAA

Zawartość opakowania:

Termometr
2 baterie AAA

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.