

## Test ciążowy płytkowy PINK Super Czuły, 1 szt.



Cena: 13,64 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

Szybki i bardzo czuły test ciążowy PINK Super Czuły o wysokiej precyzji, służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Czułość testu wynosi 10 mIU/ml a dokładność ponad 99,9 % (potwierdzona badaniami klinicznymi).

Wykonanie badania testem ciążowym PINK Test jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na płytce testowej uzyskuje się w czasie 1-5 minut. Do przeprowadzenia testu wystarczy próbka porannego moczu (jest najlepszy do badania ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG) zebrana do czystego i suchego naczynia. Zaleca się go przeprowadzić najwcześniej w pierwszym dniu po terminie przewidywanej miesiączki.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 – 30°C). Nie zamrażać. Nie używać testu po terminie ważności. Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

#### Sposób użycia:

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu.

Test wyjąć z aluminiowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

1. Badany mocz pobrać do czystego i suchego naczynia.
2. Tuż przed badaniem otworzyć kopertkę z testem i wyjąć z niej płytkę testową i plastikową pipetkę. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
3. Płytkę testową umieścić na poziomej, płaskiej powierzchni.
4. Przy użyciu pipetki nabrać próbkę moczu - końcówkę plastikowej pipetki zanurzyć w badanym moczu i ściskając górną część pipetki, napełnić ją moczem.
5. Odmierzyć 3 pełne krople moczu i włożyć do okienka na płytce testowej. W celu poprawnego wykonania testu, pipetkę trzymać

ponowo, ok. 1 cm nad powierzchnią płytki testowej tak, aby utworzyły się duże, swobodnie spadające krople, bez pęcherzyków powietrza.

6. Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu w bibule przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekać, aż w okienku wynikowym pojawią się barwne prążki.
7. Wynik odczytać po 2-5 minutach od momentu wprowadzenia moczu do okienka na płytce testowej.
8. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę. Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

#### Interpretacja wyniku:

##### Wynik dodatni (ciąża)

Na płytce pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T jest taka sama lub słabsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.

##### Wynik ujemny (brak ciąży)

Na płytce pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

##### Wynik niejednoznaczny

W przypadku, gdy na płytce nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu ściśle przestrzegając instrukcji użycia.

##### Zawartość opakowania:

- test w aluminiowej kopercie
- plastikowa pipetka
- instrukcja

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.