

Test ciążowy strumieniowy PINK Super Czuły, 1 szt.



Cena: 14,69 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Strumieniowy test ciążowy PINK Super Czuły to produkt o wysokiej precyzji, służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Wykonanie badania testem ciążowym PINK Test jest bardzo szybkie i proste, a wynik w postaci barwnych prążków na płytce testowej uzyskuje się w czasie 1-4 minut. Do przeprowadzenia testu wystarczy próbka porannego moczu, który jest najlepszy do badania (zawiera najwięcej hormonu hCG). Zasada działania testu ciążowego opiera się na reakcji hormonu hCG znajdującego się w moczu kobiety w ciąży z monoklonalnymi przeciwciałami anty-hCG, które zostały naniesione na test.

Czułość testu wynosi 10 mIU/ml, a dokładność według danych producenta ponad 99,9 %.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 – 30°C). Nie zamrażać. Nie używać testu po terminie ważności. Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

Sposób użycia:

- Bezpośrednio przed badaniem otworzyć kopertkę z testem i wyjąć z niej test strumieniowy. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
- Zdjąć nasadkę z testu, nie wyrzucać jej i skierować jego końcówkę pod strumień moczu na co najmniej 10 sekund (można również zebrać mocz do czystego i suchego naczynia i zanurzyć w nim sama końcówkę testu na 10 sekund).
- Po wyjęciu końcówki z badanego moczu, założyć na niego nasadkę i umieścić go na poziomej powierzchni, tak aby widoczne były obydwa okienka testu.
- Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C. Odczekać do pojawienia się w barwnych prążków.
- Wynik testu odczytać można po 1-4 minutach od momentu zanurzenia końcówki testu w moczu.
- Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę.

Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

Interpretowanie wyniku testu:

Wynik dodatni (ciąża)

Na płytce testowej pojawiają się dwa wyraźne paski: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążków nie ma znaczenia. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży. W celu potwierdzenia wyniku testu należy udać się do lekarza.

Wynik ujemny (brak ciąży)

Na teście pojawia się prążek kontrolny C, nie pojawia się prążek testowy T. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

Wynik niejednoznaczny

W przypadku, gdy na płytce nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny, należy wtedy powtórzyć badanie używając nowego testu postępując według instrukcji użycia.

Zawartość opakowania:

- test strumieniowy w szczelnie zamkniętej kopertce (ze środkiem pochłaniającym wilgoć)
- instrukcja

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.