

Visoftan CARE chusteczki sterylne do oczyszczania okolic oczu, 20 szt.



Cena: 34,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 szt.
Postać	chust.
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny dla dorosłych i dzieci, przeznaczony do oczyszczania obszaru wokół oka, stosowany również przed i po zabiegach chirurgicznych oka. Produkt wykazuje skuteczność w przypadku wystąpienia zapalenia oka, infekcji lub alergii, wydzieliny z oka, objawów infekcji lub alergii na skutek zmian patologicznych oraz do czyszczenia okolic oka.

Sól sodowa kwasu hialuronowego jest jednym z głównych składników macierzy pozakomórkowej większości tkanek. Dzięki jej zdolności do zatrzymania wody oraz właściwościom błonotwórczym działa ona nawilżająco i ochronnie. Substancje zawarte w produkcie umożliwiają staranne oczyszczenie obszaru oka oraz okolic wokół oka, co sprawia, że chusteczki mogą być stosowane wspomagająco w trakcie leczenia oka zaleconego przez lekarza. Składniki Visoftan Care wykazują właściwości oczyszczające, nawilżające, ochronne i łagodzące, dzięki czemu wyrób ten jest niezwykle delikatny i odpowiedni do wrażliwej skóry okolic oczu.

Skład:

Gaza ze 100-procentowej bawełny, nasączona 3 ml następującego roztworu: woda, PEG/PPG-20/15 poli(dimetylosiloksan) (dimetykon), wyciąg z kwiatów rumianku pospolitego (*Chamomilla recutita*), glikol propylenowy, wyciąg ze świetlika lekarskiego (*Euphrasia officinalis*), hialuronian sodu, sól amonowa kwasu glicyryzynowego, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kwasów tłuszczowych oleju kokosowego i aminokwasów z pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenylloetylowy, chlorek sodu, wodorowęglan sodu.

Sposób użycia:

Dokładnie umyć ręce.

Otworzyć saszetkę i wyjąć gazę.

Starannie oczyścić okolice oka za pomocą gazy w celu usunięcia wydzieliny lub wszelkich innych pozostałości (zanieczyszczeń, pyłków itp.).

W przypadku wystąpienia trudnych do usunięcia pozostałości lub zatkania kanaliką łzowego zaleca się ogrzewać saszetkę w ciepłej wodzie (o temperaturze 40°C) przez kilka minut, a następnie użyć gazy jako ciepłego kompresu, jednocześnie wykonując nią delikatny masaż. Dodatkowo można wycisnąć zawartość gazy na oko, delikatnie pochylając głowę, a następnie masować ten obszar gazą aż do

całkowitego usunięcia pozostałości.

W przypadku zapalenia oka zaleca się włożyć szczelnie zamkniętą saszetkę na kilka godzin do lodówki, a następnie nałożyć schłodzoną gazę na oko i pozostawić ją na kilka minut.

Opakowanie: 20 chusteczek

Wytwórca:
Via Luigi Razza
3 20124 Milano
Włochy

Dystrybutor:
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.