

Woreczek, pojemnik do pobierania moczu dla chłopców APTEO, 150 ml



Cena: 2,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 poj. po 150 ml
Postać	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Sterylizowany radiacyjnie pojemnik do pobierania moczu od noworodków i niemowląt - dla chłopców.
Produkt jednorazowego użytku, jałowy.

Instrukcja używania:

1. Wyjąć pojemnik z opakowania.
2. Odciągnąć załamane dno pojemnika.
3. Usunąć przekładkę papierową.
4. Przykleić pojemnik do ciała tak, aby otwór pokrywał się z anatomicznym ujściem cewki moczowej.
5. Napętniony pojemnik odkleić od ciała, załamać powierzchnię lepną i skleić.

Pojemność: 150 ml

Podmiot odpowiedzialny:
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.