

Zakraplacz do oczu SANITY, 1 szt.



Cena: 7,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Precyzyjny zakraplacz do oczu może być stosowany do podania płynu do oczu, ale także uszu czy też nosa lub jako dozownik leków.

Wyrób jest higieniczny, dzięki miękkiemu i elastycznemu balonikowi ułatwia precyzyjne dozowanie i pozwala zaaplikować dokładnie taką dawkę płynu jak jest potrzebna. Wykonany jest ze szkła, dzięki czemu łatwiej utrzymać jego higienę.

Instrukcja użycia:

Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem obie części zakraplacza należy rozdzielić i na kilka minut zanurzyć w całości w gotującej się wodzie.

Ścisnąć ssawkę i zanurzyć końcówkę zakraplacza w przygotowanym płynie, a następnie zassać go poprzez zwolnienie nacisku.

Odpowiednią dawkę płynu aplikować poprzez ściśnięcie balonika tak, aby ciecz wylewała się kroplami przez otwór na końcu rurki.

Środki ostrożności:

Podczas zabiegu należy zachować bezpieczną odległość wyrobu od oka.

Rodzaj zastosowanego roztworu/leku zawsze skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Unikać bezpośredniego kontaktu rąk z końcówką zakraplacza.

W przypadku uszkodzenia wyrobu należy go wyrzucić.

Nie stosować środków dezynfekujących.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.