

Zestaw plastrów bambusowych tkaninowych APTEO, 30 szt.



Cena: 15,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Zestaw tkaninowych plastrów z opatrunkiem z biodegradowalnym włóknem bambusowym, które przeznaczone są do opatrywania skaleczeń, jako bariera mechaniczna.

Właściwości:

- przepuszczalne dla powietrza
- miękkie i delikatne
- hipoalergiczny klej
- sterylne

Sposób użycia:

Oczyszczyć i osuszyć ranę.

Wyjąć plaster z saszetki. Zdjąć z powierzchni plastra papier ochronny i unikając kontaktu z warstwą samoprzylepną nakleić plaster na oczyszczoną wcześniej ranę.

Ostrzeżenia:

Nie stosować w przypadku zakażenia rany.

Opatrunek jest sterylny, przed przyklejeniem nie należy go dotykać w miejscu mającym kontakt ze skórą.

Nie przyklejać plastra zbyt ciasno.

Po przyklejeniu plastra, miejsce jego aplikacji powinno być utrzymane suche i czyste. Po zamoczeniu plaster należy wymienić na nowy.

W przypadku wystąpienia infekcji rany należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Zachować ostrożność podczas stosowania na skórze skłonnej do alergii. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, plaster trzeba usunąć i tymczasowo zaprzestać jego używania.

Plaster należy wymieniać na nowy po 12 godzinach lub w razie potrzeby.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawartość opakowania: 30 plastrów w dwóch rozmiarach:

15 szt. - 19 mm x 76 mm

15 szt. - 25 mm x 76 mm

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.